



FILTRO PARA VEIA CAVA

Filtro para Veia Cava com
Sistema Introdutor

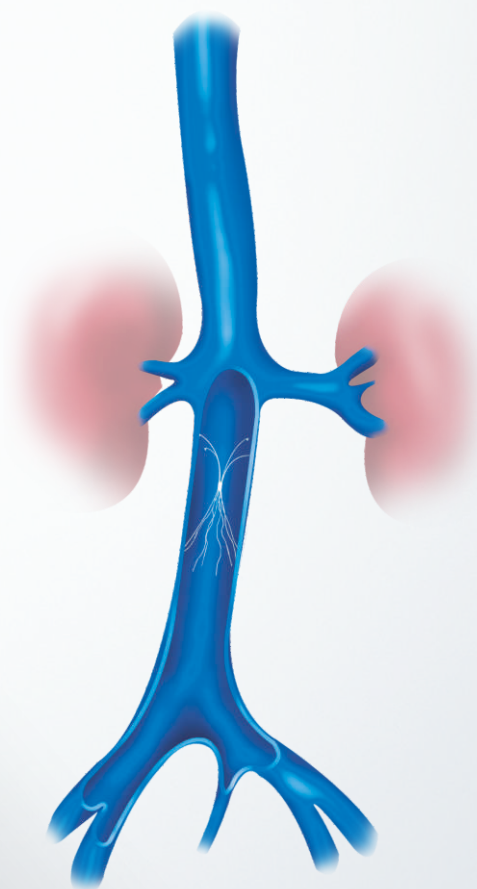

Filtro permanente em aço inoxidável.
 Acesso femoral ou jugular decidido no procedimento.
 Baixo perfil, introdutor 7Fr.
 Autocentrante, com liberação segura e controlada.
 Alta eficiência no bloqueio de trombos.
 Excelente visualização radiopaca.

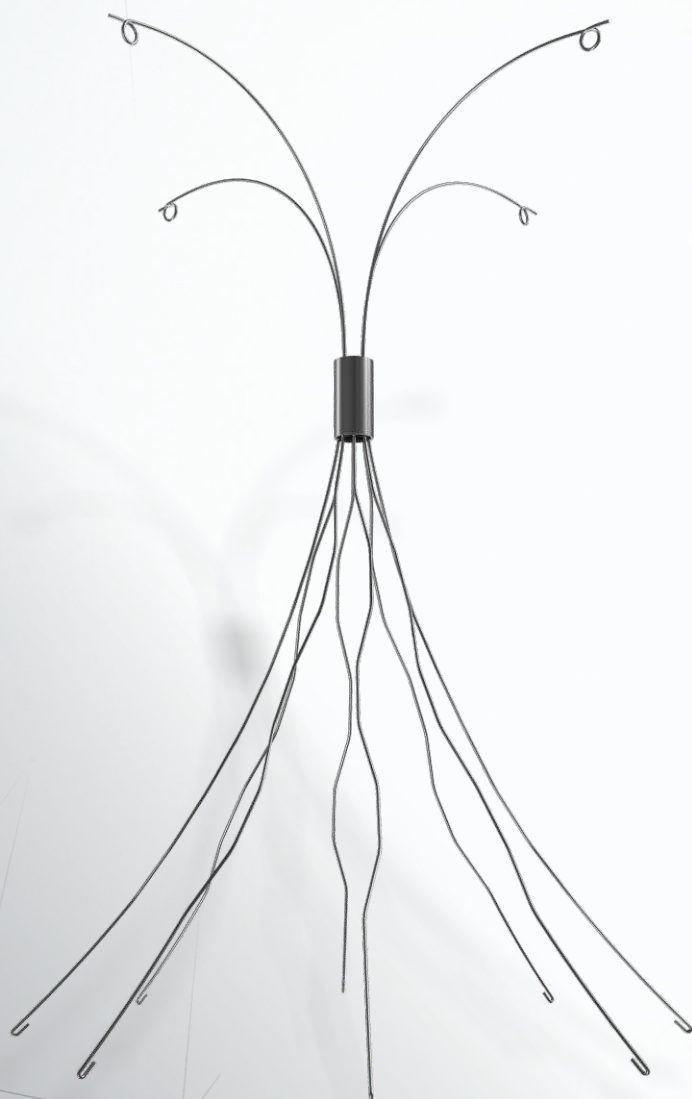

Filtro inserido em cartucho.
 Escolhe-se a via para introdução no momento do procedimento, conforme indicação clínica.

FILTRO CURTO

Para veia cava inferior com diâmetro variando entre 18mm e 28 mm

DIÂMETRO DA CAVA (MM)	COMPRIMENTO DO FILTRO (MM)
18	56.3
20	54.1
22	52.7
24	51.6
26	50.5
28	50.1

FILTRO LONGO

Para veia cava inferior com diâmetro variando entre 28mm e 35mm

DIÂMETRO DA CAVA (MM)	COMPRIMENTO DO FILTRO (MM)
28	74.1
30	72.7
32	71.5
34	70.3
35	70.0

* Consulte disponibilidade de outras medidas.

IMPLANTE INTRODUZIDO POR DESLOCAMENTO NO INTERIOR DA BAINHA

- 1 Ponta da bainha com dilatador e fio guia



Válvula de hemostase com manípulo do dilatador acoplado




- 2 Cartucho lado femoral inserido na válvula



- 3 Bastão de deslocamento iniciando transferência



- 4 Filtro transferido pronto para liberação

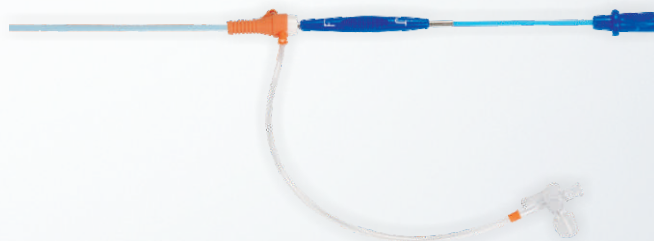

- 5 Início da liberação lado femoral

