

A photograph of a young man and woman in a field of tall grass, smiling and holding a large, blank sheet of paper. The man is in the background, and the woman is in the foreground, both looking towards the camera. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

# Parche de Pericardio Bovino

 **BRAILE**

LIFE-SAVING TECHNOLOGIES

El Parche de Pericardio Bovino está hecho de pericardio bovino, previamente tratado con solución de glutaraldehído y conservado en solución de formaldehído al 4%.


Ese tratamiento químico le otorga características apropiadas de resistencia, flexibilidad y ausencia de antigenicidad.

## Indicaciones de Uso



### Cirugía Cardiovascular

- Cierre de defectos intercavitarios;
- Ampliación del anillo aórtico en intercambios valvulares;
- Reconstrucciones auriculares y ventriculares;
- Cerclaje coronario en procedimientos sin circulación extracorpórea y correcciones quirúrgicas de las enfermedades de la aorta;
- Arterioplastias periféricas;
- Ampliación del tracto de salida del VD;
- Tratamiento de aneurismas aórticos y del ventrículo izquierdo;
- Operación de Mustard;
- Reconstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar.

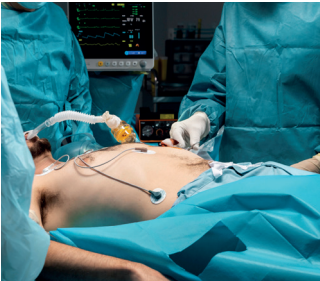

### Cirugía Torácica

- Cierre del muñón bronquial;
- Cierre de hernias diafragmáticas;
- Tratamiento de defectos de la pared torácica (congénitos y traumáticos).



### Cirugía General

- Tratamiento quirúrgico de hernias y eventraciones.



### Cirugía Urológica

- Citoplastias;
- Uretroplastias.



### Neurocirugía

- Sustitución de duramadre.

# Información Adicional

- Producto de uso único.
- La conservación del parche se debe hacer a 10 y 30 °C, sin jamás someterlo a congelación o temperaturas superiores a 40 °C.




Código	Modelo
4293	Parche de Pericardio Bovino: 11 x 6 cm
4248	Parche de Pericardio Bovino: 11 x 9 cm

# Instrucciones de Uso

- Sacar el parche del recipiente con ayuda de una pinza atraumática, debiendo manipularlo solamente con las manos para evitar cualquier traumatismo.
- La técnica de implante del producto sigue el criterio del equipo médico.
- Lavar exhaustivamente el pericardio antes del uso en un recipiente con aproximadamente 500 mL de solución salina, cambiando la solución a lo menos tres veces durante 15 minutos.

**Caducidad:** Dos años a partir de la fecha de fabricación. Se lo considera estéril mientras el sello no esté roto.

Síguenos en redes sociales:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



**Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.**

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159030049

Responsable técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010