



Conjunto de Tubos CEC BPM

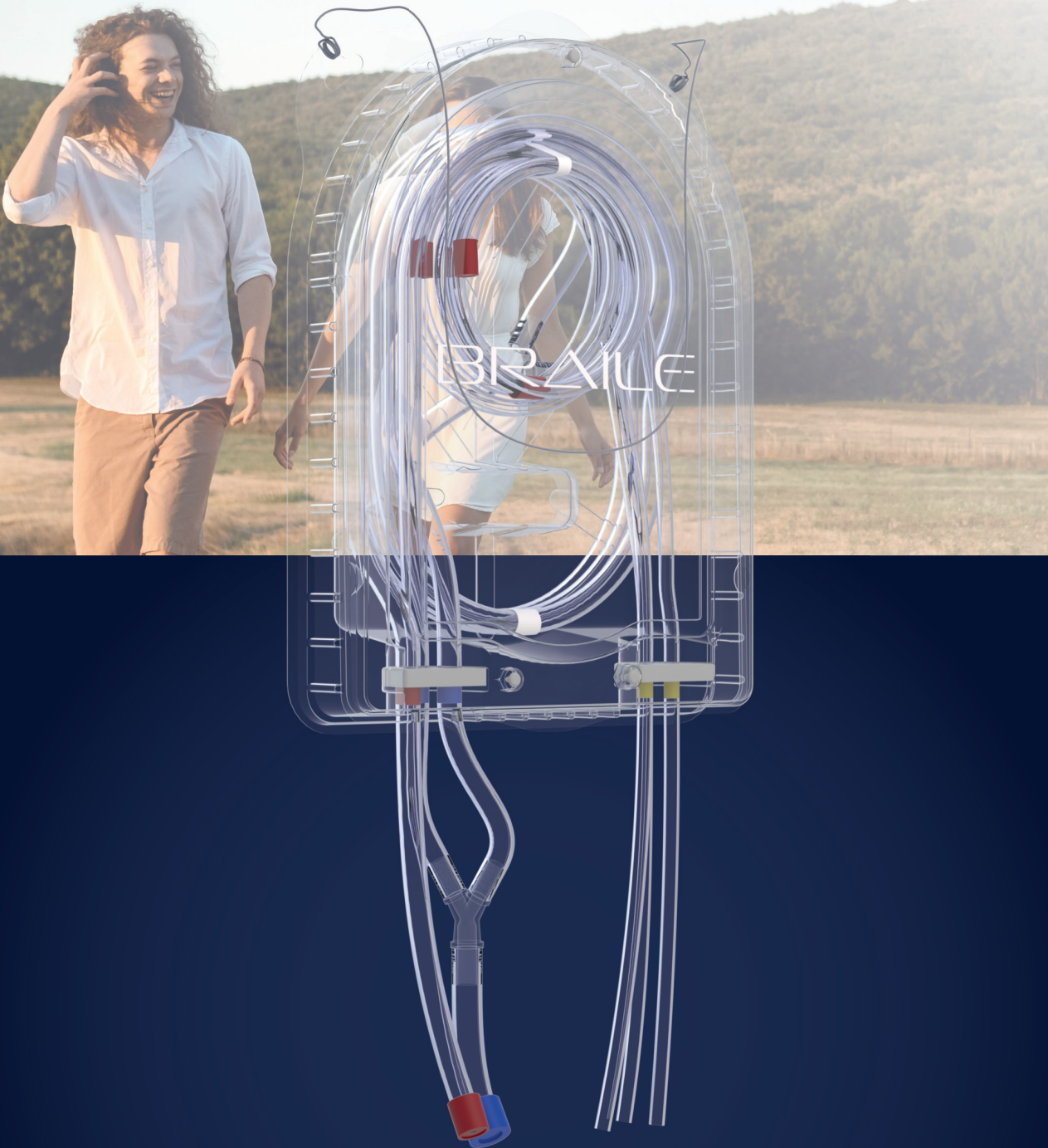

O Conjunto de Tubos CEC BPM foi desenvolvido com modelos específicos para atender circuitos de circulação extracorpórea adulto, infantil e neonato, compatíveis com os principais eletromédicos do mercado, oferecendo diferentes comprimentos nas linhas de bomba e aspiradores. O conjunto inclui diversos acessórios complementares, pensados para proporcionar liberdade e flexibilidade na montagem, permitindo que o profissional personalize o circuito de acordo com sua preferência e necessidade clínica, sem limitações.

Além disso, os tubos recebem o revestimento biocompatível BRCoating®, à base de albumina humana recombinante, que recobre toda a superfície interna, reduzindo a interação do sangue com o material.

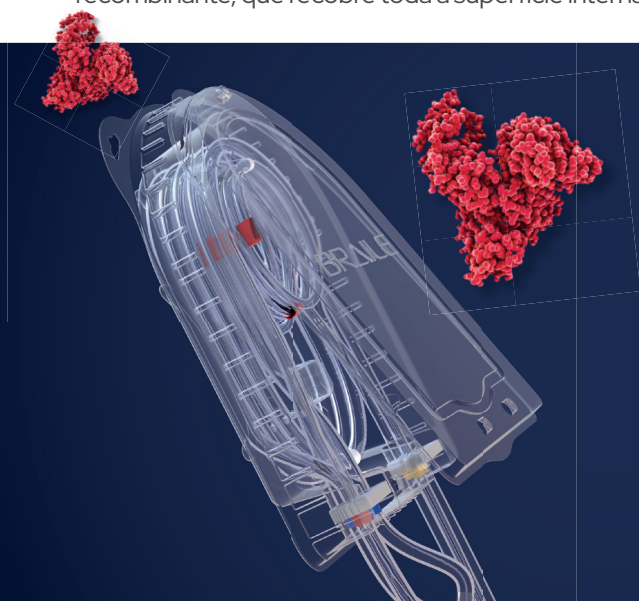

- Design Aprimorado
- Variedade de Tamanhos
- Alta Compatibilidade com equipamentos do mercado
- Acessórios exclusivos para personalização do circuito
- Produto revestido com BRCoating biocompatível



Código	Descrição	Modelo	Registro Anvisa
622568	CJ Tubos CEC BPM-001 Adulto	Cava Dupla	10159039010
622576	CJ Tubos CEC BPM-002 Adulto		
622580	CJ Tubos CEC BPM-003 Adulto		
622584	CJ Tubos CEC BPM-201 Infantil		
622594	CJ Tubos CEC BPM-202 Infantil		
622600	CJ Tubos CEC BPM-203 Infantil		
622682	CJ Tubos CEC BPM-401 Neonato		
622692	CJ Tubos CEC BPM-402 Neonato		
622698	CJ Tubos CEC BPM-403 Neonato		
622546	CJ Tubos CEC BPM-601 Adulto	Cava Única	10159039009
622556	CJ Tubos CEC BPM-602 Adulto		
622562	CJ Tubos CEC BPM-603 Adulto		

Indicação

O Conjunto de Tubos CEC BPM é indicado para o transporte de solução fisiológica, sangue e gases durante procedimentos de circulação extracorpórea em cirurgias cardíacas com até 6 horas de duração. Deve ser utilizado em pacientes quando a taxa de fluxo sanguíneo necessária (débito cardíaco) que não exceda:

- Conjunto de Tubos CEC BPM Adulto: 7 L/min
- Conjunto de Tubos CEC BPM Infantil: 3 L/min
- Conjunto de Tubos CEC BPM Neonato: 1,5 L/min

Manipulação correta para abertura do berço

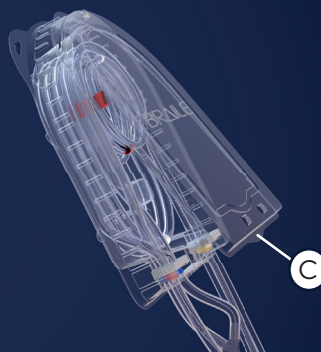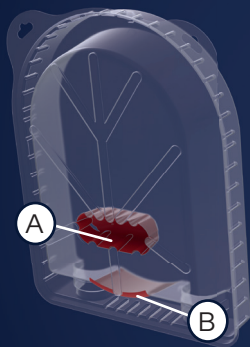

1. Posicione o dedão no ponto "A" e os outros quatro dedos no ponto "B"
2. Com a outra mão puxe o ponto "C" para cima

Linha Mesa


A linha de Mesa inclui as linhas arterial, venosa e de aspiradores, dispostas em um berço que protege as porções dos tubos em contato com o campo cirúrgico, prevenindo contaminações durante a montagem do circuito. As linhas arterial e venosa são pré-conectadas, permitindo o preenchimento do circuito sem a abertura do berço.


Linha Bomba

A linha de Bomba é composta pelo conjunto das linhas de bomba, bomba centrífuga, filtro arterial, recirculação, oxigênio e soro, além de conectores, extensores, abraçadeiras e torneiras de três vias.

Componente	Adulto Cava Única	Adulto Cava Dupla	Infantil Cava Dupla	Neonato Cava Dupla
Linha Arterial	3/8"	3/8"	1/4"	3/16"
Linha Venosa	1/2"	3/8"	1/4"	3/16"
Linha de Bomba	3/8" - 1/2" - 3/8"	3/8" - 1/2" - 3/8"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 1/4" - 3/16"
Linha de Bomba Centrífuga	3/8"	3/8"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"
Linha de Filtro Arterial	3/8"	3/8"	1/4"	1/4" - 3/16"
Linha de Recirculação	1/4"	1/4"	1/4"	4,3 mm
Linha Oxigênio	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Linha de Aspiradores	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"	1/4" - 3/8" - 1/4"
Linha de Soro	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Linha de Extensores	4,3 mm	4,3 mm	4,3 mm	4,3 mm
Conectores	Reto c/ luer 1/2" x 1/2" Reto c/ luer 3/8" x 1/2" Reto c/ luer 1/4" x 1/4" Y 1/4" x 1/4" x 1/4" Y 1/2" x 3/8" x 3/8"	Reto c/ luer 1/2" x 1/2" Reto c/ luer 3/8" x 1/2" Reto c/ luer 1/4" x 1/4" Y 1/4" x 1/4" x 1/4" Y 1/2" x 3/8" x 3/8"	Reto c/ luer 3/8" x 3/8" Reto c/ luer 1/4" x 1/4" Y 1/4" x 1/4" x 1/4"	Reto c/ luer 1/4" x 1/4" Reto c/ luer 3/16" x 3/16" Reto c/ luer 3/16" x 1/4" Y 1/4" x 1/4" x 1/4"
Acessórios	Torneira de 3 vias Abraçadeira	Torneira de 3 vias Abraçadeira	Torneira de 3 vias Abraçadeira	Torneira de 3 vias Abraçadeira
Pressão máxima linhas de sangue	100 kPa (760 mmHg)	100 kPa (760 mmHg)	100 kPa (760 mmHg)	100 kPa (760 mmHg)

Nos siga nas redes sociais:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159039010 | 10159039009

Responsável técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010